



FICHA DE PRODUCTO

REF: FANTASY ANTI COVID-19

CARACTERÍSTICAS

Los inhibidores activos del SARS-COV 2 (COVID-19) presentes en la superficie textil de la mascarilla eliminan la vida del virus, bacterias y hongos en menos de dos horas.

Estas mascarillas son lavables y reutilizables. Por razones higiénicas se recomienda lavar la mascarilla una vez a la semana.

La protección contra el virus permanece tras los lavados.

La mascarilla mantiene todas sus propiedades y características hasta un máximo de 10 lavados.

Vida útil aproximada, 10 semanas.

Composición del producto

70% Viscosa (algodón natural)
30% Poliéster

Fabricante: GRUPO ATENZZA (Atenzza outdoor, S.L, LP Textil and Design)



Tallas

L = 19,6 x 15cm

M = 17,5 x 14,5cm

S = 16 x 13cm

Requisitos de seguridad

Respirabilidad 41,7 Pa/cm² (Requisitos sanitarios < 60)

Eficacia filtración bacteriana (BFE) 90,07%.

INDICACIONES DE USO

Indicaciones generales

En ningún momento se debe colocar la mascarilla en la frente o debajo de la barbilla.

Recuerda que junto al uso de mascarilla se debe seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad sobre la distancia mínima de seguridad y el resto de indicaciones sanitarias.

¿Qué medidas higiénicas debo respetar al ponerme o quitarme mi mascarilla?

Antes de manipular la mascarilla, lávate las manos con agua y jabón o aplícate una solución hidroalcohólica.

¿Cuánto tiempo puedo llevar puesta mi mascarilla Ecodry?

Por cuestiones de comodidad e higiene se recomienda no usar la mascarilla de forma continuada por un tiempo superior a 8 horas.



¿Cómo debo guardar mi mascarilla Ecodry mientras no la uso?

Puedes guardar tu mascarilla Ecodry en una funda transpirable apta para mascarillas. Pero si quieres maximizar tu protección contra el virus te recomendamos las fundas Ecodry con el mismo tejido anti COVID-19 que el de tus mascarillas.

¿Cuándo debo lavar mi mascarilla Ecodry?

Por higiene es recomendable lavar tu mascarilla Ecodry al menos una vez a la semana.

¿Cómo debo lavar mi mascarilla Ecodry?

Puedes lavar tu mascarilla a mano o en la lavadora. En este último caso introdúcela dentro de una bolsa de lavado. Aplica detergente estándar, nunca lejía, y utiliza un programa corto con temperatura inferior a 60 grados.